


腸内細菌検便・採便方法 ポイント解説

【採便管のキャップの外し方】

中指と薬指で本体を持ち、親指でキャップを静かにずらしながら、ゆっくりとキャップを引き抜く。

※ 勢いよくスティックを引き抜くと、中の保存液が飛び散りますのでご注意ください。

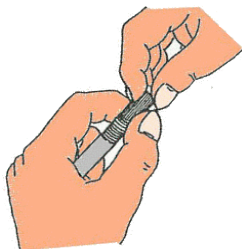

【便の取り方】


便の表面にスティックの先端部を2〜3回突き刺すか又は便表面で回転させながら擦り取って、穴の部分に便が埋まる程度採取してください。また、なるべく新しい大便をとって下さい。

注意 下痢便のときは、スティックの先端部全体に便をつけてください。



【キャップの差し込み方】

スティックを斜め上より本体に差し込み、パチンと音がするまで押し込む。

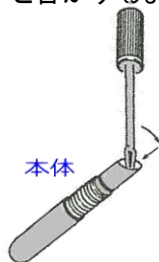

【洋式・和式トイレの座り方】



洋式トイレの場合は、いつもの方向とは逆となる反対向きに座って採取してください。

トイレットペーパーを長めに取り、何重にも折り畳んで厚目にして便器の手前側に敷いてください。

トイレットペーパーが溜まり水で濡れると便の重みでずり落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。

【簡便採取法のご案内】



洋式トイレの場合、上記の方法(逆座り法)では実際には採取できないケースが多くあると思います。

例えば、

- ① 水面積が大きいタイプではペーパーの置き場所が無い。
- ② 便座の形状やスペースの関係で逆向きに座ることが困難。
- ③ 便器底面の傾斜が大きく重みで便が滑り落ちて水没する。
- ④ 立ち上がるとセンサーで自動的に水が流れてしまうタイプ



そこで、簡便な採取法(洋式・和式ともOK)をご紹介します。

- ① まず、通常のスタイルで便器に座ってください。
- ② そして、排便途中で、一度、多めのトイレットペーパーで肛門を掴むような感じで拭いてください。
- ③ そうすると、大目の便がトイレットペーパーに付着します。
- ④ 付着した便からスティックで必要な量を採取してください。



ご不明な点やご質問などございましたら、弊社(06-6648-7157)までお問合せください。