




ノロウイルス検便・採便方法 ポイント解説

採便管キット一式

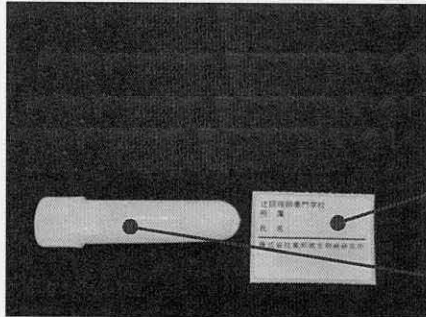

名前シール

採便管

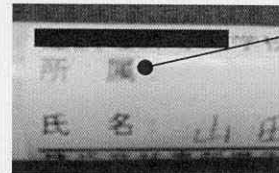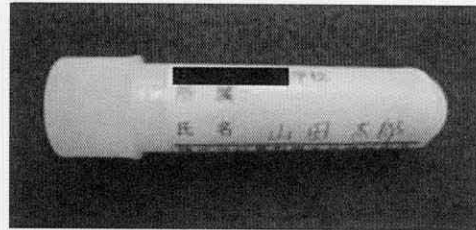


所属欄には、所属
部課、学生はクラ
ス・番号などを記
入して下さい。

【シール貼付】


名前シールに所属・氏名を記入して採便管に貼って下さい。

※名前印字済シールをご使用の場合、「所属」「氏名」の記入は必要ありません。

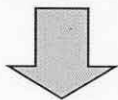


【採便】 採便管の蓋に付属のスプーンで小指第一関節程度の便を採取して下さい。下痢便の場合は、付属スプーンで2ハイ程度(0.5mL)

- ・トイレトペーパーを水面より上部に敷き、その上に排便しますと採取しやすくなります。
- ・便はトイレの水に触れさせないで下さい。水に触れるとウイルスが薄められてしまうおそれがあります。
- ・トイレ洗浄剤を使用している場合はウイルスが失活し正しい検査結果が出ない場合があります。

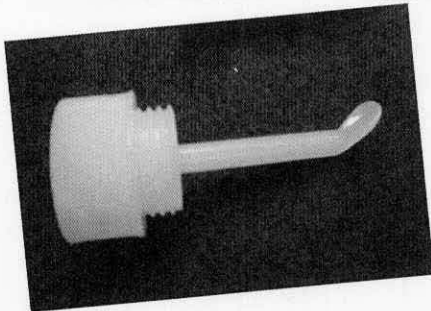

- ・少なすぎると検査ができない場合がありますので注意すること。
- ・量が足りない場合は、再提出になります。
- ・出来るだけ多めの量を採取してください。
- ・ノロウイルスに関する検査なので、女性は生理中でも検査結果に影響はありません。

ねじ込み式キャップを便が漏れないように最後までしっかりと閉めてください。
シール貼付を確認のうえ、そのまま検体袋に入れてジッパーを必ず閉めてください。

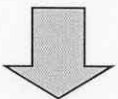

【保管】 検便は、冷暗所で保管して下さい。

冷蔵・冷凍が望ましいですが、保冷剤・保冷ボックスによる保管も可

ご不明な点やご質問などございましたら、弊社(06-6648-7157)までお気軽にお問合せください。

株式会社東邦微生物病研究所