


# ☑ (名前入り) 検体袋の使用方法



検体袋と名前シールが一体になっています。下記の要領で取り扱いをお願いします。

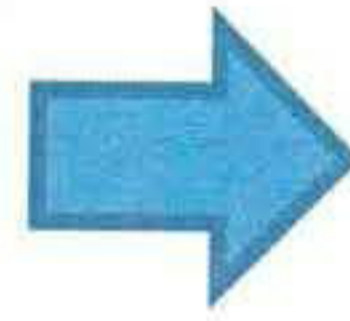


所属、氏名を確認してください。



シール部分を剥がしてください。

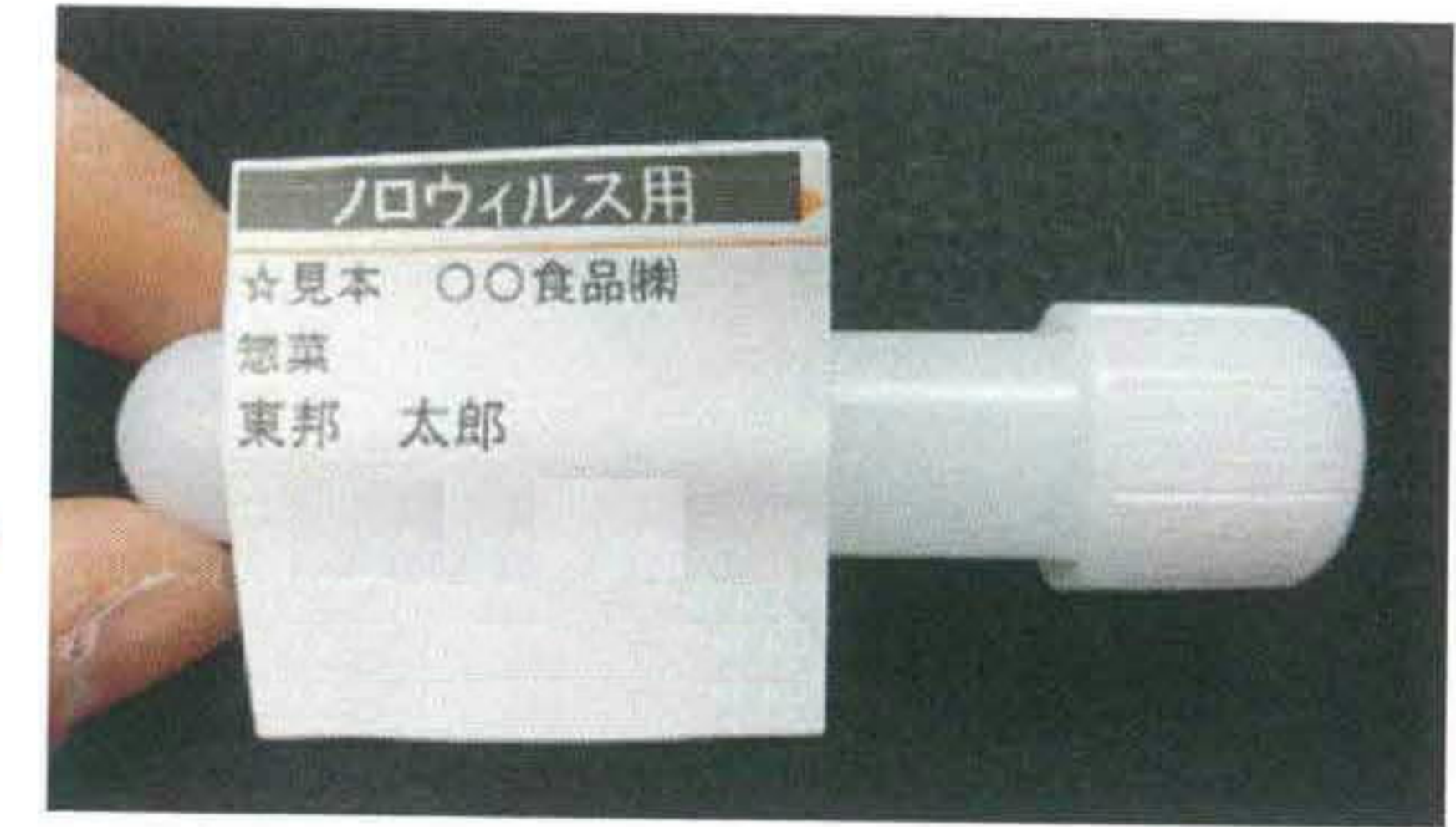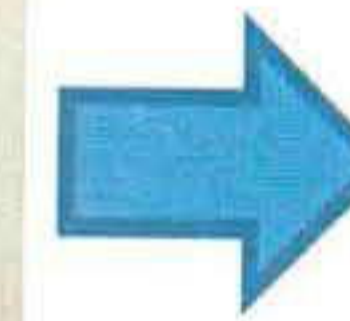


シールを容器に貼ってください。

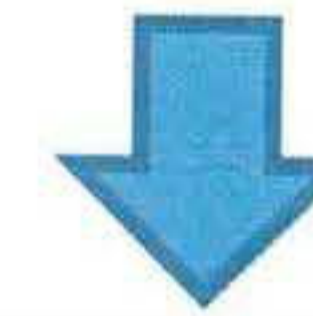

検便容器のフタのスポーンで子指の第一関節程度の便を採取して下さい。  
便を採取後、検体袋に封入してください。



裏面の台紙(のりしろ部分)を剥がし、シール部を閉じてください。

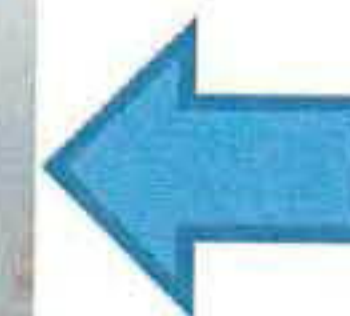

完成です。

※新規採用者等 氏名が登録されていない場合は、無地袋をご利用ください。(必ず「会社名」「所属又は店舗名」「氏名」を記入してください)