

【ウイルス検査用】検体袋の使用方法

表面

ウイルス検査用
見本 大阪〇〇食品 本社
製造(見本)
大阪 太郎(見本)
2020/02-01-999901-0000-00100001

検査項目 (0003)
ノロウイルス (RT-PCR法)

【採取に関する注意事項】
ウイルス検査の場合は、専用容器のキャップについてスプーンでさじ一杯、便を採取してください。

このラベルをはがして容器に貼ってください。

やまおり
ウイルス検査用 検体袋用 02月01回

会社名
見本 大阪〇〇食品 本社


部署/店舗
製造(見本)

お名前
大阪 太郎(見本) 0000100001

2020/02-01-999901-0000-00100001 採取年月日 年 月 日

株式会社 東邦微生物病研究所

裏面

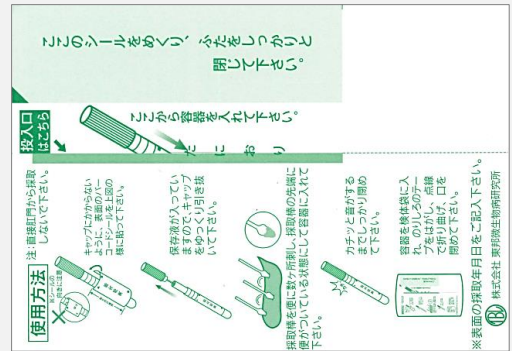


「部署/店舗名」「お名前」を確認してください


使用方法を確認してください



① 左上の名前シールをはがして、採便容器に貼り付けてください。

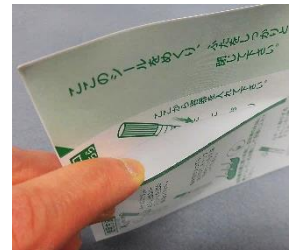

② 便を採取後、スリット(切れ目)から採便容器を入れてください。


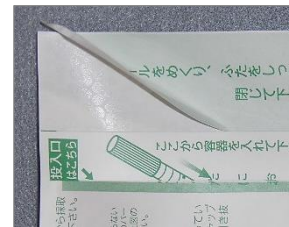


③ 裏面の「のりしろテープ」をはがし、

④ やまおり点線で折り曲げ、袋の封を閉じてください。

⑤ 一部箇所には「のりしろ」はありませんが、容器がこぼれ出ることはありません。

⑥ 完成です。

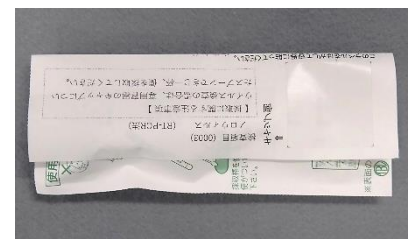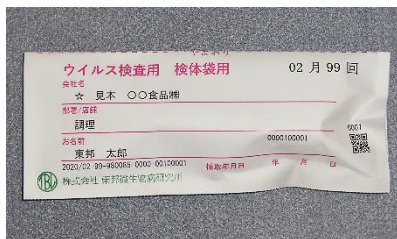

新規採用者等 氏名が登録されていない場合は、無地検体袋をご利用ください。

(必ず「会社名」「部署/店舗名」「お名前」を記入してください)