

【腸内細菌検査用】検体袋の使用方法

表面

検査項目 (0547)
赤痢・サルチ・腸管大・ファス・パ・ラファA

☆ 見本 ○○食品株式会社
調理 東成 聡子

2020/02-03-980085-0000-00100011

このラベルをはがして容器に貼ってください。やまおり

腸内細菌検査用 検体袋 02月03回

会社名
☆ 見本 ○○食品株式会社

部署/店舗
調理


お名前 00106

東成 聡子

2020/02-03-980085-0000-00100011 採取年月日 年 月 日



株式会社 東邦微生物病研究所

裏面

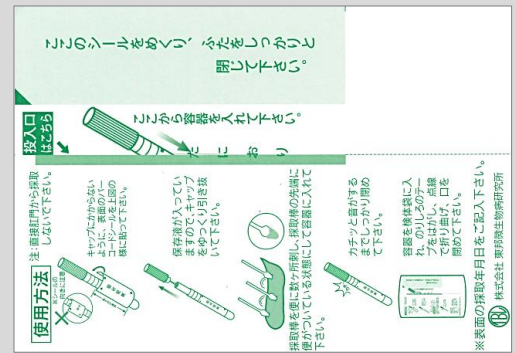

「部署/店舗名」「お名前」を確認してください

使用方法を確認してください

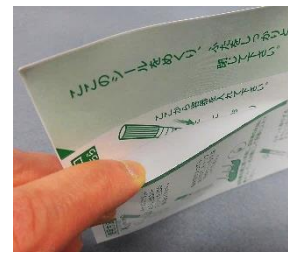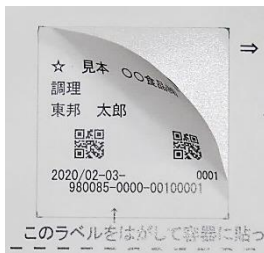

② 便を採取後、スリット (切れ目) から採便容器を入れてください。

① 左上の名前シールをはがして、採便容器に貼り付けてください。

検査項目 (0547)
赤痢・サルチ・腸管大・ファス・パ・ラファA

☆ 見本 ○○食品株式会社
調理 東成 聡子

2020/02-03-980085-0000-00100011

このラベルをはがして容器に貼ってください。やまおり

腸内細菌検査用 検体袋 02月03回

会社名
☆ 見本 ○○食品株式会社


部署/店舗
調理

お名前 00106



東成 聡子

2020/02-03-980085-0000-00100011 採取年月日 年 月 日

株式会社 東邦微生物病研究所

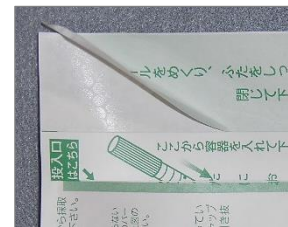

③ 裏面の「のりしろテープ」をはがし、

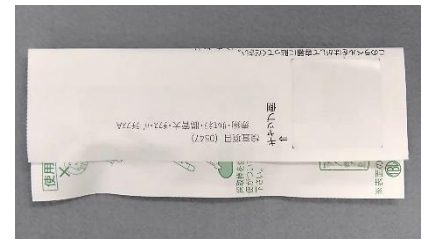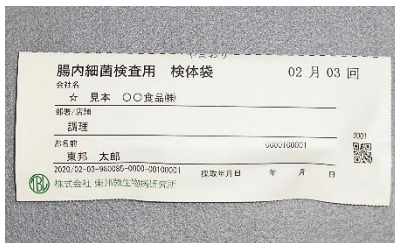

⑥ 完成です。

⑤ 一部箇所に「のりしろ」はありませんが、容器がこぼれ出ることはありません。


④ やまおり点線で折り曲げ、袋の封を閉じてください。

新規採用者等 氏名が登録されていない場合は、無地検体袋をご利用ください。

(必ず「会社名」「部署/店舗名」「お名前」を記入してください)

無地検体袋（名前のない検体袋）について

新規採用者等 氏名が登録されていない場合は、無地袋をご利用ください。
所定の欄に「会社名」「部署/店舗名」「氏名」を記入してください。

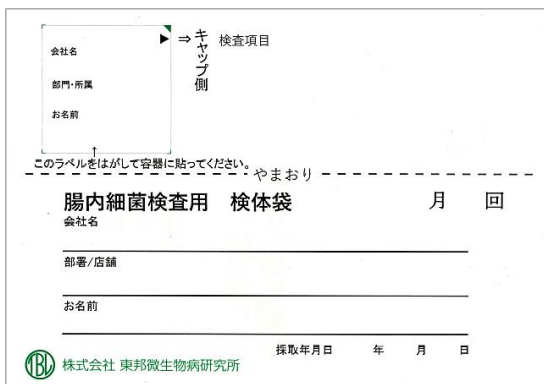

会社名
部門/所属
お名前

⇒ キャップ側
検査項目


このラベルをはがして容器に貼ってください。やまおり

腸内細菌検査用 検体袋 月 回

会社名
部署/店舗
お名前

採取年月日 年 月 日

株式会社 東邦微生物病研究所

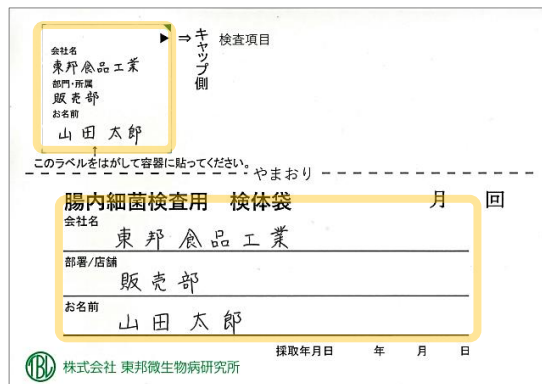

会社名
東邦食品工業
部門/所属
販売部
お名前
山田太郎

⇒ キャップ側
検査項目

このラベルをはがして容器に貼ってください。やまおり

腸内細菌検査用 検体袋 月 回

会社名
東邦食品工業
部署/店舗
販売部
お名前
山田太郎

採取年月日 年 月 日

株式会社 東邦微生物病研究所

便の採取方法について



- ✓ 本体からキャップをゆっくり引き抜いてください。
- ✓ キャップに採取棒が固定されています。
- ✓ 便の表面に採取棒の先端部を2～3回突き刺し、便を採取してください。
- ✓ 下痢便の時も同様に便を採取してください。
- ✓ キャップを容器本体に差し込み、パチンと音がするまで押し込んでください。
- ✓ 容器本体には保存液が入っておりますが採取後は速やかに提出してください。
- ✓ 容器の使用期限はキャップに記載されています。

採便後の保管について

採便後の容器は、直射日光を避け「室温保管」してください。
(冷蔵・冷凍で保管する必要はありません)

検査不能とは？

検査をしても菌が全く見つからないことです。
便を採取しているにもかかわらず、採取量が少量であったり、水洗トイレの溜まり水に浸けただけで菌が全く見つからない場合も検査不能となります。
検査不能にならないように、採便棒の先端に便がしっかり付着しているのを確認してから提出してください。